

## Otoskopická inspekční WiFi kamera EndSc-06

---

Návod k obsluze



### Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3 , Praha 4- 14100


## Podrobný manuál

### 1. Obsah balení

- Otoskopická inspekční WiFi kamera EndSc-06
- USB kabel
- Uživatelský manuál v AJ



### 2. Popis zařízení

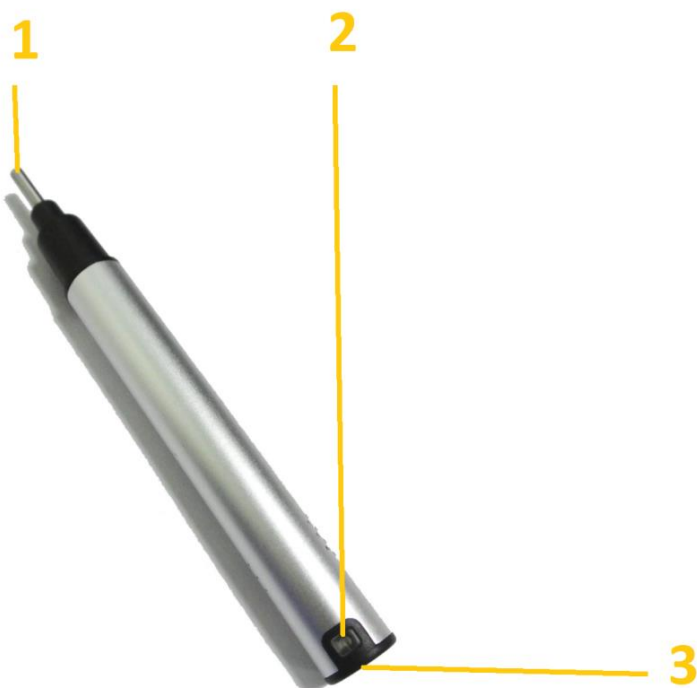


1 – Kamera s přísvitem

2 – Power tlačítko s LED diodou

3 – Napájecí konektor micro USB

### 3. Připojení k aplikaci

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci „OtoScope“ prostřednictvím Google Play či AppStore.

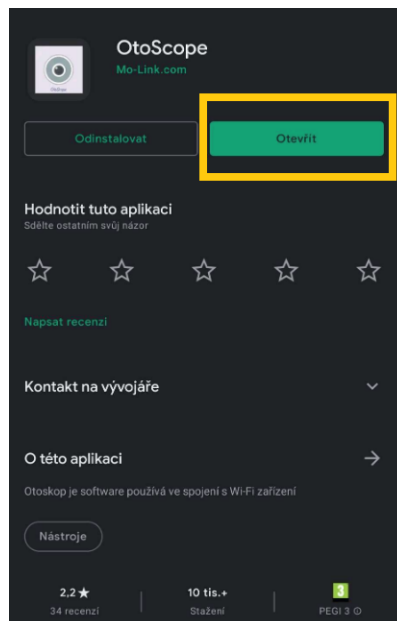


2.

3. Kameru plně nabijte pomocí přiloženého kabelu. Tento kabel můžete připojit k PC či napájecímu adaptéru 5V. Během napájení svítí červená dioda. Plné nabití je signalizováno zhasnutím této diody.
4. Odejměte vrchní kryt zařízení, který ukrývá objektiv kamery.
5. Zapněte zařízení podržením tlačítka Power. Zapnutí je signalizováno rozsvícením signalizační (modré) LED diody. Automaticky se zapne IR přísvit. Pro vypnutí přísvitu stiskněte krátce tlačítko Power.

**Pozn.** Kameru vypnete dlouhým stiskem tlačítka Power.

6. Připojte telefon na WiFi zařízení. Název této WiFi začíná Otoscope.

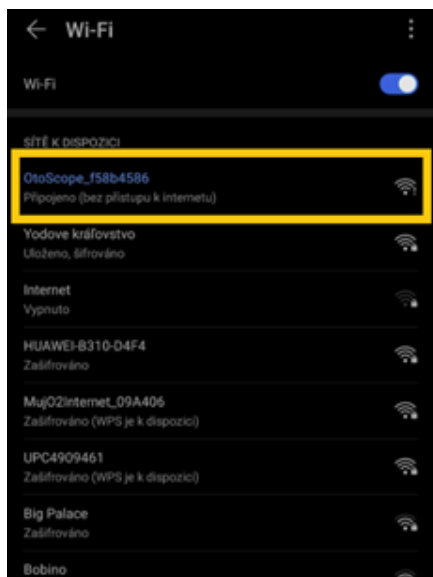

7. Po otevření aplikace OtoScope můžete sledovat živý přenos, pořizovat fotografie či videosoubory, které najdete v galerii aplikace.

#### 4. Aplikace



- 1 – Mód zobrazení
- 2 – Rozlišení kamery
- 3 – Nahrávání záznamu

- 4 – Pořízení snímku
- 5 – Složka se záznamy
- 6 – Obraz z inspekční kamery



## **5. Závěrečná ustanovení**

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.